

TEST LÁPIZ

3 DROGAS + ALCOHOL EN SALIVA

Un test rápido para la detección cualitativa simultánea de multidrogas y sus metabolitos en saliva humana. Test rápido para multidrogas Midstream para COC / BZO / THC + ALC es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de drogas múltiples y sus metabolitos en fluido oral.

DETALLES

Contenedor	Sellado (durabilidad 1 hora de su apertura)
Detección	4 parámetros
Tipos de Drogas	COC / BZO / THC / ALC
Requisito Operación	Inmediato o Diferido
Almacenamiento	Período Prolongado
Sellado	Hermético



NIVELES DE CORTES

Sustancia	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección		Precisión	%
			Mínimo	Máximo		
COCAÍNA	COC	20	5-10 Min.	24 Horas	SENSIBILIDAD	94,70%
					ESPECIFICIDAD	96,50%
BENZODIAZEPINAS	BZO	30	2 Horas	72 Horas	SENSIBILIDAD	95,00%
					ESPECIFICIDAD	95,00%
MARIHUANA	THC	50	4 Horas	14 Horas	SENSIBILIDAD	94,90%
					ESPECIFICIDAD	98,30%
ALCOHOL	ALC	0,02	30 Min.	24 Horas	SENSIBILIDAD	96,80%
					ESPECIFICIDAD	97,90%

NOTA:

El período durante el cual una prueba de drogas puede detectar la presencia de una sustancia en el sistema de una persona es altamente variable debido a varios factores, como el momento de consumo, la cantidad ingerida, la presencia de otras drogas, el metabolismo individual, de la forma de administración de la sustancia y otras variables. Debido a la complejidad de estos factores, determinar con precisión la ventana de detección para un individuo específico puede resultar difícil o casi imposible. Por esta razón, se proporciona una tabla de referencia como guía general, pero es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar ampliamente entre individuos.

TEST LÁPIZ 3 DROGAS + ALCOHOL EN SALIVA

Tabla de sustancias/metabolitos detectadas

Sustancia	Metabolitos	Nivel Corte ng/ml
COCAÍNA	Benzoylecgonina	20
BENZODIAZEPINAS	Oxazepam	30
MARIHUANA	11-nor-Δ^9-THC-9 COOH	50
ALCOHOL	Alcohol	0,02%



PRECAUCIONES PARA EL TEST DE ALCOHOL:

Los materiales de prueba que han estado expuestos al fluido oral deben tratarse como potencialmente infecciosos. **No use el test rápido de alcohol para fluido oral después de la fecha de caducidad** marcada en el paquete de aluminio.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL TEST DE ALCOHOL:

La prueba rápida de alcohol debe almacenarse a 2-30°C en su paquete de aluminio sellado. Si la temperatura de almacenamiento excede los 30°C, el rendimiento de la prueba puede degradarse. Si el producto está refrigerado, la prueba rápida de alcohol (FLUIDO ORAL) debe llevarse a **temperatura ambiente** antes de abrir la bolsa.

MATERIALES PROPORCIONADOS

- Lápiz multidroga
- Inserto
- Tabla de interpretación para ALC (Cuando corresponda)



RECOGIDA DE MUESTRA Y PREPARACIÓN

La muestra de fluido oral debe recogerse utilizando el colector que se proporciona con el kit. Seguir las instrucciones de uso que se detallan a continuación. Puede utilizar la muestra de fluido oral recogida en cualquier momento del día. Al realizar la prueba de alcohol, el almacenamiento de las muestras de saliva no debe exceder las 2 horas si están a temperatura ambiente, sin embargo, si la muestra ha estado refrigerada no debe exceder las 4 horas.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar empaquetados en sus bolsas selladas a 2-30°C. El test es estable hasta su fecha de caducidad impresa en su bolsa. El test debe permanecer en su bolsa sellada hasta el momento de su uso. **NO CONGELAR.** No usar pasada su fecha de caducidad.



TEST LÁPIZ 3 DROGAS + ALCOHOL EN SALIVA



INSTRUCCIONES

Permita que el test Midstream, y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar el test.

Advierta a la persona que se va a realizar el test de que **NO se introduzca nada en la boca**: Comida, bebida, chicle o tabaco, al menos en los 10 minutos previos a la toma de la muestra.

Permita que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el test de la bolsa y utilícelo en un plazo a una hora.

Retire la tapa de Midstream e inserte la mecha (almohadilla) absorbente en la boca. **Colóquela debajo de la lengua** para recoger el fluido oral hasta que aparezcan las líneas de color y luego retírelo de la boca. Coloque el test sobre una superficie plana y limpia. Según ilustración.

Lea los resultados a los 10 minutos. No interprete los resultados pasado una hora.

Lea el resultado del indicador de alcohol (Cuando el indicador para ALC este incluido en el test) de 3 a 5 minutos. Compare el color de la almohadilla de reacción con la tabla de colores suministrada por separado en la bolsa de aluminio para determinar el nivel relativo de alcohol en el fluido oral

NOTA

- No utilizar pasada la fecha de caducidad.
- El test debe permanecer en su bolsa sellada hasta el momento de uso.
- El fluido oral no está clasificado como un riesgo biológico a no ser que se derive de un procedimiento dental.
- El colector de muestra y el test lápiz deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C), y otra en la región del test (T). Este resultado negativo indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.



NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

POSITIVO: Solo aparece una línea de color en la región de Control (C) y NO aparece línea de color en la región del test (T).



INVÁLIDO: No aparece línea de color en la región de Control (C). Las razones más comunes para la ausencia de la línea de color en la región de Control son insuficiente volumen de muestra o un procedimiento aplicado incorrectamente. Revisar el procedimiento y repetir el test de nuevo

